

omnipod®
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

OPCIONES DE COLOCACIÓN

Dado que **NO TIENE TUBOS**, puede llevar el pod cómodamente en cualquier lugar donde podría ponerse una inyección.

No olvide llevar **dos pods sin abrir** a su primera sesión de formación. Los usará para aprender a colocar su primer pod.

COLOCACIÓN DEL POD




BRAZO Y PIERNA

Coloque el pod en posición vertical o ligeramente inclinado.



ABDOMEN, ESPALDA Y NALGAS

Coloque el pod en posición horizontal o ligeramente inclinado.

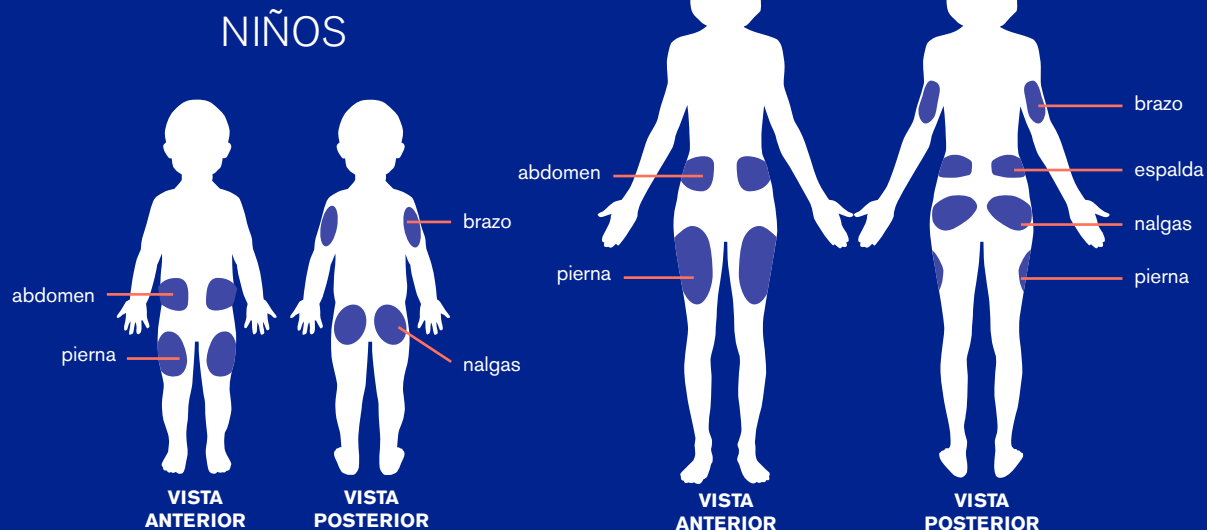

ADHESIÓN ÓPTIMA

Use una toallita con alcohol para limpiar la zona. Deje que se seque al aire por completo antes de aplicar el pod. No lo ubique en ningún sitio donde le afecten los pliegues de la piel.

INSERCIÓN ÓPTIMA

Para facilitar la inserción, coloque una mano encima del pod y pellizque la piel cercana a la cánula. Oprima el botón Start (Comenzar) en el PDM. Suelte la piel una vez insertada la cánula. Este paso es muy importante si la zona de inserción es muy magra o no tiene mucho tejido adiposo.

© 2017 Insulet Corporation. Omnipod, Podder y el logotipo de Omnipod son marcas comerciales o marcas registradas de Insulet Corporation en los Estados Unidos de América y otras varias jurisdicciones. Todos los derechos reservados.

Información sobre patentes de EE. UU. en www.insulet.com/patents.

Todas las fotografías son de usuarios reales del sistema Omnipod®.

www.myomnipod.com

18909-SPA-AW Rev A 12/17